

AÜRA

TECHNOLOGIES ITALIA 



# LASER MULTIDIODO 808 NM PER DEPILAZIONE PROFESSIONALE NUOVA TECNOLOGIA DEFOCALIZZATA



## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La metodica di depilazione LASERLAB EPILWELL è basata sulla trasformazione della luce in calore (fototermolisi selettiva). L'energia laser è assorbita dal fusto e dai tessuti piliferi e viene convertita in calore, incrementando dunque la temperatura dei follicoli. Quando la temperatura è abbastanza alta si ottiene un danneggiamento della struttura del follicolo, che regredisce dopo un certo periodo grazie a processi fisiologici naturali, raggiungendo lo scopo di rimozione progressiva dei peli.



## IL BERSAGLIO

Il bersaglio della luce laser è la melanina, utilizzata dall'organismo come pigmento. Il termine 'fototermolisi selettiva' deriva dal fatto che la luce laser a 808 nanometri è inoffensiva per la pelle e per le sue strutture, ma viene assorbita selettivamente dal follicolo pilifero ricco di melanina. I follicoli che sono nella fase anagen hanno la più grande quantità di melanina e possono assorbire l'energia chiara che proviene dal laser. L'energia del laser danneggia il follicolo dei peli e altera la relativa capacità di svilupparne altri. Col tempo, i peli cadranno verso l'esterno e la crescita sarà rallentata fino alla progressiva scomparsa.



# Laser LAB EPILWELL

## I CROMOFORI

Le sostanze colorate che assorbono luce sono chiamate cromofori. I principali cromofori che si trovano nella cute sono la melanina, l'emoglobina e l'acqua. Ogni cromoforo si caratterizza per una differente capacità di assorbimento in funzione della lunghezza d'onda della luce.

A seconda dell'intervallo di lunghezze d'onda utilizzato è quindi possibile colpire un bersaglio piuttosto che un altro. Il cromoforo, assorbendo la luce, si riscalda e trasmette il calore ai tessuti circostanti.

L'emissione laser di LASERLAB EPILWELL utilizza uno spettro di emissione che interessa principalmente il cromoforo melanina ed, in misura minore, l'emoglobina.



Versatile, sicuro e attivo su tutti i fototipi

**MADE IN ITALY**  
Progettato e costruito in Italia  
**ULTRAVELOCE E POTENTE**  
Tempi di seduta ridotti

**EFFICACE**  
Ottimi risultati per Uomini e Donne

**VERSATILE**  
Sicuro e attivo su tutti i fototipi

**DELICATO**  
Manipolo con superficie refrigerata

**ANCHE D'ESTATE**  
Utilizzo continuativo 12 mesi l'anno

**PRODUTTIVO**  
Crescita del volume d'affari ed alta redditività

Art. IW2240/16

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente Laser: Diodo HQM verylong life

Lunghezza d'onda: 808 nm +/-10nm

Densità: 40J/cm2 max

Potenza generatore: 600 W

Dimensione area zaffiro: 13x13mm

Emissione multi spot: da 1 a 12 impulsi al secondo


Emissione single spot: da 1 a 3 impulsi frazionati

Durata di ogni singolo impulso: da 10 a 300 ms

Raffreddamento zona trattata : da 0°C a 10°C

Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v.- 50/60 Hz

Dimensioni e peso con carrello: cm. L 48 x P 50 x H 112 – Kg. 65

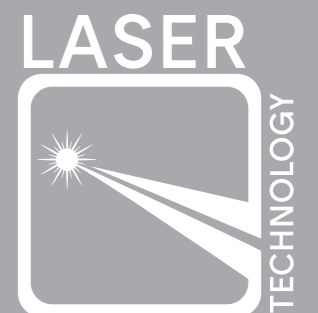





## SISTEMA RINGIOVANIMENTO VISO IN 6 FASI ATTIVE ANTIETÀ

### FUNZIONI

**FASE 1 CONTROLLO IDRATAZIONE:** attraverso un leggero passaggio di corrente permette di rilevare la percentuale di idratazione cutanea effettuando una valutazione iniziale essenziale per lo svolgimento delle fasi successive e per il controllo dei risultati.

**FASE 2 DERMO - EXFOLIANT:** svolge la sua azione in 2 momenti imprescindibili. L'aspirazione favorisce la stimolazione epidermica migliorando la microcircolazione, l'ossigenazione e la tonicità dei tessuti trattati. Durante l'aspirazione la cute, tenuta in tensione, è pronta per l'azione esfoliante e viene sottoposta ad una delicata levigatura.

**FASE 3 ELETTROPORAZIONE:** attraverso l'emissione di particolari microcorrenti agevola la formazione temporanea di elettropori, aumenta la permeabilità dei tessuti cutanei e facilita la veicolazione transdermica profonda ottimizzando l'azione dei principi attivi utilizzati.

**FASE 4 RADIOFREQUENZA BIPOLARE:** l'intenso effetto termico biologicamente attivo di questa energia consente l'attenuazione di rughe e pieghe cutanee (effetto riempitivo), la distensione dei tratti (effetto lifting) e la rielasticizzazione della pelle con aumento della densità, della tensione e della luminosità.

**FASE 5 MICRO - LIFTING:** L'efficacia del massaggio miodermico per attenuare l'affaticamento dei tessuti e rilassare le microtensioni che causano le spiacevoli rughe d'espressione. Il metodo agisce a livello muscolare svolgendo un'azione importante sulla fisionomia del viso.

**FASE 6 STIMOLAGE:** È un'azione elettrostimolante dei tessuti muscolari per recuperare la tonicità e ridare armonia ai contorni del viso. Trattamento antietà indispensabile in presenza di atonia.

Age LAB  
SKINWELL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La metodica AgeLab SkinWell combina le più avanzate tecnologie antietà per offrire un trattamento di ringiovanimento tissutale unico ed estremamente efficace.

La fusione di ben 6 tecnologie altamente performanti permette di svolgere tutte le fasi di un protocollo completo di trattamento viso décolleté; dall'analisi preventiva dello stato della cute, all'esfoliazione, alla veicolazione del trattamento specifico fino al lifting e alla tonificazione.



Close-Up Dermo-Esfoliazione



Art. IW2079

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo:

multimetodo con Controllo Idratazione, Microdermoabrasione Dermo-Exfoliant, Radiofrequenza, Micro-Lifting, Elettroporazione e StimolAge

1 - Controllo Idratazione: 8 V.p.p.- 0,2 mA

2 - Dermo-Exfoliant: aspirazione vacuum in modalità continua max 80 kPa

3 - Elettroporazione: sistema con forma d'onda multifrequenza max 1,5 mA/cm<sup>2</sup>

4 - Radiofrequenza tipo resistivo: 450 KHz. - max 25 W

5 - Micro-Lifting: max 1,5 mA/cm<sup>2</sup>

6 - StimolAge: 40 Vpp - max 12 mA

Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v.- 50/60 Hz. Potenza Assorbita: 200 W

Dimensioni corpo macchina: cm. L 48 x P 47 x H 28 - Kg. 7





## SISTEMA COMPIUTERRIZZATO PER PRESSOMASSAGGIO A 8 SETTORI

Presso **LAB**  
DRAINWELL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema Pressolab Drainwell esegue un delicato e piacevole massaggio drenante a “compressione intermittente” la cui azione idroregolatrice agisce efficacemente sugli inestetismi, favorendo la raccolta e l’eliminazione di liquidi e scorie interstiziali.

Il suo utilizzo agevola l’attività di interscambio tissutale, consentendo il flusso di nuove sostanze nutritive e migliorando l’aspetto della pelle. Il PressoLab Drainwell è un apparato pre-programmato con selezione di 8 differenti sequenze di pressomassaggio linfodrenante (Vodder, Ascendente, Fisiologico, ecc.) per applicazioni localizzate alle gambe, ai piedi ed al busto/girovita. E’ possibile trattare anche le braccia ed il viso con accessori opzionali. La possibilità di regolare opportunamente i vari parametri di trattamento favorisce un’applicazione personalizzata che si avvicina molto alla tecnica di massaggio manuale. La sua azione presso-drenante riduce il volume delle zone trattate, tonifica i tessuti e trasmette una piacevole sensazione di benessere. Pressolab Drainwell è progettato per garantire i migliori risultati estetici in modo piacevole e rilassante. L’accurato controllo computerizzato della “pressione di lavoro” consente di applicare il trattamento anche con livelli di compressione molto bassi, aumentando la piacevolezza complessiva delle applicazioni. Il pressomassaggio è attuato con funzionamento silenzioso per il massimo comfort acustico a livello cabina.

Art. IW3467

### CARATTERISTICHE TECNICHE

N. 8 programmi/sequenze per la migliore personalizzazione del trattamento

Settori di gonfiamento: 8 indipendenti

Pressione di lavoro: regolabile da 20 a 120 mmHg


Potenza assorbita: 30 w


Alimentazione: disponibili varie alimentazione da 90 V a 240 V – 50/60 Hz

Dimensioni corpo macchina: cm. L 48 x P 47 x H 28 – Kg. 6

### IL PRESSO SET ANATOMICO EXECUTIVE

Gli accessori gonfiabili sono stati concepiti e sviluppati per adattarsi anatomicamente alle varie fisionomie e alle diverse taglie fisiche. Dotati di settori indipendenti a compressione fisiologica, questi accessori vantano un rivestimento esterno di robusto materiale antistrappo e uno interno di tessuto atossico e antimicotico facile da pulire. Come dotazione opzionale sono disponibili i Bracciali Anatomici con Mano e il Caschetto Anatomico per massaggio Viso-Craniale.

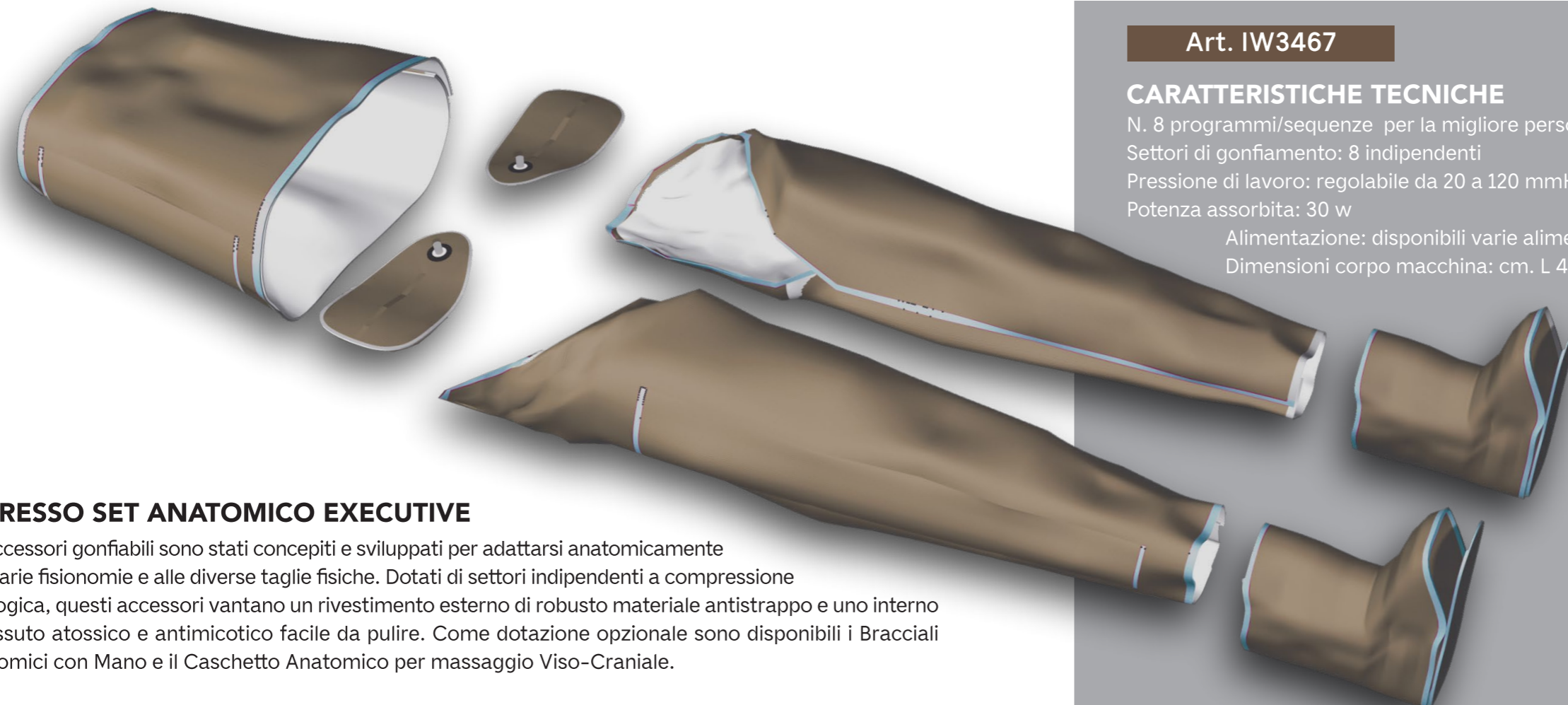

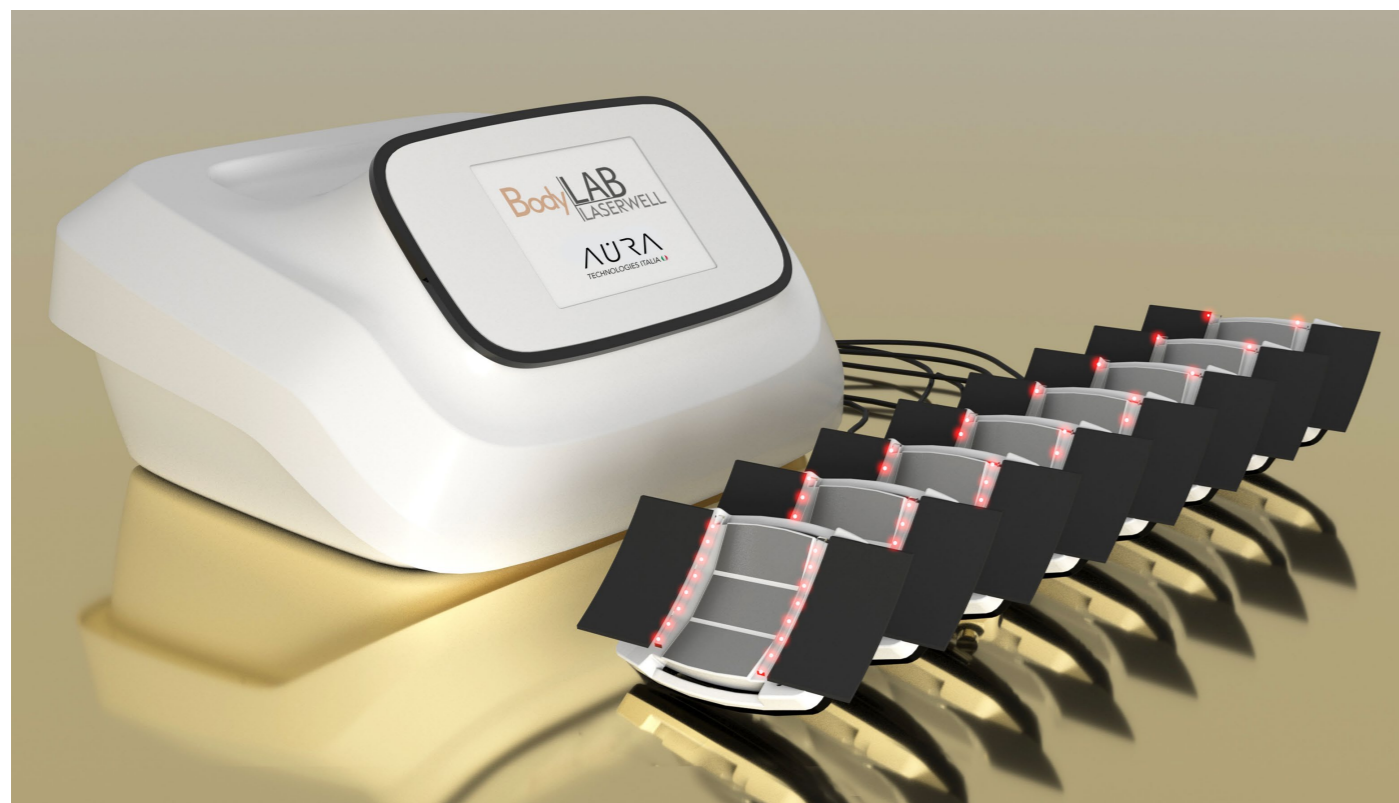

## SISTEMA CORPO CON ENERGIA LASER PER TRATTAMENTI AUTOMATICI DI POSA

### FORME DI ENERGIA BODYLAB LASERWELL

**LASER LLLT:** La fotostimolazione laser effettuata con lunghezza d'onda 980 nm consente di agire sui tessuti e sui piccoli depositi adipo-cellulitici favorendo l'assorbimento dei prodotti cosmetici con benefici effetti in termini di tonificazione e rassodamento. Le capacità sinergiche in abbinamento al laser LLLT consentono un positivo rimodellamento della silhouette che apparirà visibilmente alleggerita, tonica e compatta

**ELETTORIMODELLAMENTO:** Attraverso l'azione dell'elettrostimolazione si stimola la contrazione e decontrazione dei distretti muscolari nelle zone interessate da inestetismi producendo positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti, con incremento della massa magra e aumento della spesa metabolica a riposo.

**ELETTROLIPOMASSAGGIO:** L'emissione di delicate microstimolazioni nelle zone interessate da depositi adiposi e cellulitici favorisce l'attività tissutale naturale con effetti rimodellanti.

**DRENOMASSAGGIO:** L'applicazione di un mix particolare di correnti stimolanti produce un piacevole effetto pompa in grado di favorire il drenaggio linfatico della parte interessata al trattamento con alleggerimento della silhouette e riduzione di volume.

BodyLAB  
LASERWELL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli inestetismi a livello del corpo sono di natura complessa. Generalmente si assiste alla contemporanea presenza di diverse problematiche estetiche (cellulite, adipe, ristagno linfatico, rilassamento muscolare e cutaneo) nello stesso soggetto da trattare. Per questo motivo è consigliato l'utilizzo di tecnologie multifunzione come Bodylab Laserwell in grado di offrire soluzioni specifiche a seconda della problematica estetica da trattare.

Questa tecnologia multimetodo consente di effettuare trattamenti automatici di posa inseribili in un protocollo specifico studiato ad hoc, dal professionista specializzato, sulla base delle caratteristiche del soggetto trattato e sulla localizzazione degli inestetismi.

I risultati ottenibili sotto forma di rimodellamento della silhouette sono amplificati se alla tecnologia vengono abbinati prodotti cosmetici specificatamente studiati per ottimizzare gli effetti delle forme di energia emesse da Bodylab Laserwell.

La tecnologia BodyLab Laserwell è dotata di 8 applicatori Laser/Modellanti e di pratico marsupio contenitore.

Art. IW2454

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo: multimetodo con Laser LLLT, Elettrorimodellamento, Elettrolipomassaggio e Drenomassaggio


Soft Laser LLLT: Lunghezza d'onda 980 nm, Densità di Potenza max 10 mW/cm<sup>2</sup>

Elettrorimodellamento/Elettrolipomassaggio/Drenomassaggio: Generatore di impulsi max 27 mA, corrente sulle 2 placche 0,3 mA/cm<sup>2</sup>


Potenza Assorbita: 200 W

Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v.- 50/60 Hz

Dimensioni corpo macchina: cm. L 48 x P 47 x H 28 – Kg. 7

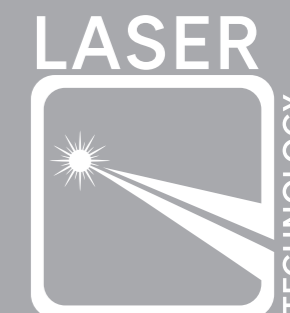



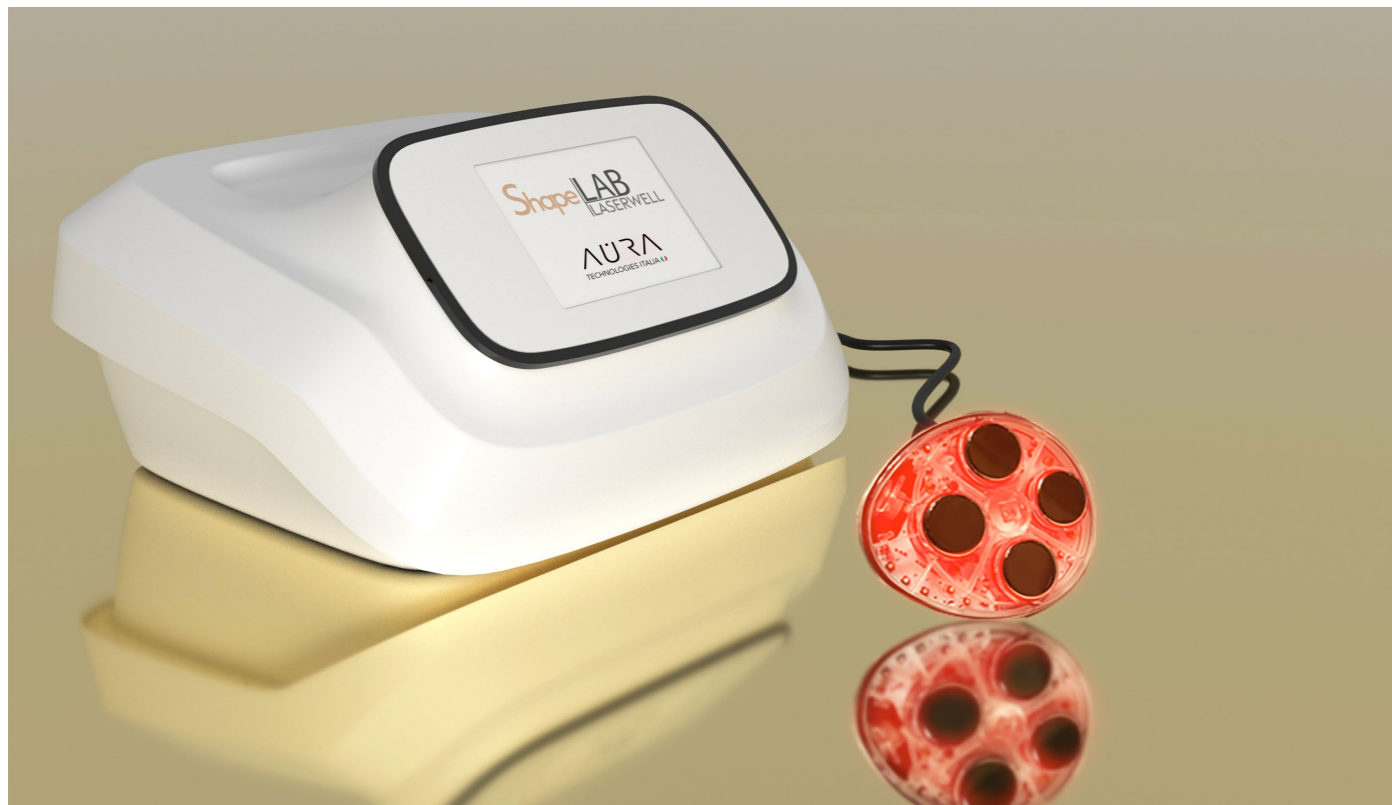

## SISTEMA CORPO CON ENERGIA LASER PER TRATTAMENTI MANUALI CON OPERATORE

### FORME DI ENERGIA SHAPELAB LASERWELL

**LASER LLLT:** La fotostimolazione laser effettuata con lunghezza d'onda 980 nm consente di agire sui tessuti e sui piccoli depositi adipo-cellulitici favorendo l'assorbimento dei prodotti cosmetici e stimolando un positivo rimodellamento della silhouette che apparirà visibilmente alleggerita, tonica e compatta.

**RADIOFREQUENZA:** l'intenso effetto termico biologicamente attivo di questa energia favorisce un aumento della circolazione sottocutanea con azione positiva sugli inestetismi localizzati, generale miglioramento della qualità dei tessuti e rassodamento cutaneo.

**ELETTROPORAZIONE:** veicolazione profonda con tecnologia non invasiva. Mediante un processo fisico aumenta la permeabilità dei tessuti cutanei, agevolando l'assorbimento di prodotti idrosolubili anche ad alto peso molecolare.

**CROMOBENESSERE:** irradiando le zone del corpo con luce di diversa colorazione si ottengono un riequilibrio, un rilassamento e un vantaggio estetico. L'inestetismo viene inteso come una vibrazione disarmonica delle cellule di una determinata zona del corpo che potrà essere riequilibrata sfruttando l'energia, e quindi la vibrazione, di uno o più colori specifici.

ShapeLAB  
LASERWELL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli inestetismi a livello del corpo sono di natura complessa. Generalmente si assiste alla contemporanea presenza di diverse problematiche estetiche (cellulite, adipe, ristagno linfatico, rilassamento muscolare e cutaneo) nello stesso soggetto da trattare. Per questo motivo è consigliato l'utilizzo di tecnologie multifunzione come Shapelab Laserwell in grado di offrire soluzioni specifiche a seconda della problematica estetica da trattare. Questa tecnologia multimetodo consente di effettuare trattamenti manuali inseribili in un protocollo specifico studiato ad hoc, dal professionista specializzato, sulla base delle caratteristiche del soggetto trattato e sulla localizzazione degli inestetismi. I risultati ottenibili sotto forma di rimodellamento della silhouette sono amplificati se alla tecnologia vengono abbinati prodotti cosmetici specificatamente studiati per ottimizzare gli effetti delle forme di energia emesse da Shapelab Laserwell. La tecnologia Shapelab Laserwell è dotata di un Manipolo Multifunzione LaserLift.

Art. IW2457

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo: multimetodo con Laser LLLT, Radiofrequenza, Elettroporazione, Elettrolipomassaggio e Cromobenessere

Laser LLLT: lunghezza d'onda 980 nm. Densità di potenza max 10 mW/cm<sup>2</sup>

Elettroporazione: sistema con forma d'onda multifrequenza max. 27 mA

Elettrolipomassaggio: generatore di impulsi max 27 mA.

Cromobenessere: led 472-639 nm, flusso luminoso 150 lm

Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v. – 50/60 Hz.

Potenza assorbita: 80 W.

Dimensioni corpo macchina: cm. L 48 x P 47 x H 28 – Kg. 7





### FORME DI ENERGIA SHAPELAB LASERWELL

La metodica INFRALAB SLIMWELL si inserisce attivamente, come valido aiuto all'estetista, nei trattamenti di attenuazione degli inestetismi corporei adiposi e cellulitici con miglioramento dell'aspetto epidermico, diminuzione di volume e riarmonizzazione delle zone trattate.

La base scientifica di tale metodica è costituita dalla naturale correlazione esistente tra temperatura corporea e processo di combustione dei grassi (legge di Van't Hoff).

Scopo del trattamento è quello di ricercare risultati significativi mediante un aumento della temperatura localizzato esclusivamente nelle zone del corpo esteticamente più critiche (ad esempio cosce, girovita, glutei e addome). In questo modo si agevola l'apporto di nuove sostanze nutritive e si ottiene un miglioramento del naturale processo di metabolizzazione dei grassi superflui. Il risultato ricercato è una riduzione di volume delle parti trattate con attenuazione dei poco estetici "cuscinetti adiposi", il tutto senza perdita di liquidi per sudorazione. La metodica di termotrattamento Infralab Slimwell favorisce l'ottenimento di forme ben modellate e di un girovita assottigliato.

InfraLAB  
LASERWELL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'Infralab Slimwell è un sistema computerizzato appositamente studiato per ottimizzare il trattamento estetico mediante calore localizzato. Il dispositivo è dotato di 5 canali di uscita indipendenti che permettono di effettuare trattamenti contemporanei su diverse parti del corpo. L'incremento di temperatura localizzato è ottenuto mediante l'impiego di particolari fasce termiche sagomate (complete di termostato di protezione) che si adattano perfettamente alle diverse parti del corpo e generano una diffusione uniforme di calore. La temperatura è regolabile (da 38 a 48 gradi circa) mediante appositi comandi che agiscono indipendentemente sui singoli canali di uscita, in modo tale da consentire incrementi di temperatura differenziati. Attraverso il software è possibile regolare con precisione la temperatura di ciascuna fascia.

La tecnologia è accessoriata con 2 fasce termiche gambe/cosce ed 1 fascia termica addominale. E' possibile completare l'accessoriato con 2 fasce termiche braccia (opzionali).

Art. IW2402

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura per trattamento di calore a raggi infrarossi mediante fasce termiche

Canali di uscita: 5 indipendenti

Fasce termiche: in materiale lavabile, atossico ed antimicotico con termosensore

Potenza Assorbita: 500 W max

Potenza d'uscita: 100 W max per canale

Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 a 240 v.- 50/60 Hz

Dimensioni e peso corpo macchina: cm. L 48 x P 47 x H 28 – Kg. 7,5



AMA LA TUA PELLE  
OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA CON



COSMETICI VEGANI  
ALTAMENTE PERFORMANTI

Detergenti Viso / Face Cleaners



Lozioni Viso / Face Lotion



Sieri Viso / Face Serum



Creme Viso / Face Cream



Sieri viso Potenziatori/ Face Up-Holder



Trattamento Mani / Hand Treatment



Maschere Viso / Face Mask



Cofanetti Viso *luxury* / Face Beauty Ritual






# AURA

## MILANO

### LA TECNOLOGIA ITALIANA AFFIDABILE, SICURA E FACILE DA AVERE

**AURA TECHNOLOGIES ITALIA** è la proposta di tecnologia italiana che si pone come facile alternativa di acquisto, affidabile e sicura, ai prodotti estetici economici di importazione extra europea. Nel rispetto della visione **AURA TECHNOLOGIES ITALWELLNESS** i vari dispositivi vengono pensati, progettati e costruiti con l'obiettivo di offrire la migliore Qualità Italiana a condizioni accessibili e finanziariamente agevolate. Per disporre di queste tecnologie è spesso sufficiente spostare di poco il livello di investimento preventivato, entrando così in contatto con una realtà produttiva italiana storica, certificata e presente sul panorama dell'estetica professionale da oltre 65 anni. Il Progetto di **AURA TECHNOLOGIES ITALIA** è infatti un'idea "start up" maturata all'interno di **AURA MILANO srl** in collaborazione con un'azienda leader italiana che produce fin dal 1958 tecnologie estetiche e medicali di altissima qualità dedicate ai segmenti Top e High Level del mercato professionale. Nel progettare le tecnologie **AURA TECHNOLOGIES ITALIA** i ricercatori hanno beneficiato di un grande supporto: l'esperienza, un patrimonio maturato in decenni di costante impegno imprenditoriale per realizzare idee e prodotti di elevata qualità. L'esperienza ci ha insegnato che per realizzare un buon progetto è opportuno andare oltre la semplice ingegneria: è necessario entrare nella metodica applicativa e nei protocolli d'uso, valutando tutti gli aspetti del trattamento come sicurezza, sensazioni cutanee, efficacia e benessere generale. Solo così è possibile arrivare al risultato ricercato: un trattamento sicuro, efficace, piacevole e ottenuto in tempi ragionevoli. Le apparecchiature sono certificate con un Sistema di gestione della Qualità con riferimento alle norme **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI CEI EN ISO 13485:2016** certificato dall'Organismo di Certificazione TUV Rheinland Italia srl.



AURA srl Via San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy  
+39 035224879 @info@auramilano.it  sevensskincare.it